

Sac INCO BAG « protège seau »

HYGIENE

DESCRIPTION : Le sac est conçu pour protéger les seaux de chaise percée des souillures (urines, matières fécales). Il associe un sac étanche, muni de liens, à un tampon très absorbant destiné à gélifier les liquides corporels et bloquer les odeurs.

HYGIENE

- Évite les souillures au niveau du seau
- Neutralise les mauvaises odeurs et les contient
- Evite le risque de renversement grâce à la gélification du tampon

CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Chaque sac se retire individuellement de la boîte distributrice
- Simplifie le travail du personnel d'accompagnement ou même de la famille
- Permet un gain de temps considérable par rapport à un lavage du seau
- Plus besoin de nettoyer le seau à chaque utilisation

GESTION DES DECHETS

- Fermeture hermétique et facile grâce à son système de liens
- Evite les risques infectieux et leur propagation
- Peut se jeter dans une poubelle ménagère



Vue de profil




Vue de dessus



DONNEES TECHNIQUES

Composition	Sac et liens coulissants en polyéthylène, tampon en non tissé à base de fluff (cellulose) et de polymères super absorbants (SAP)	Dimensions	Sac étanche : 51 X 38 cm (épaisseur 38 microns) Tampon : 13 X 24 cm
Utilisation	Usage unique	Classe CE	Dispositif médical classe I
Absorption	600 ml de solution saline à 0,9 % de NaCl - 1300 ml d'eau pure	Stockage	Conserver dans un local sec avec une t° entre - 20°C et + 60°C. Durée de conservation = 36 mois
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine		

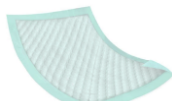

Sac INCO BAG « protège seau »

DONNEES LOGISTIQUES

Références	Dimension sac (cm)	GENCODE	Unités par boîte / par carton
530001	51 X 38	3700901301288	20 / 360
Références	Poids boîte (g)	Dimensions boîte (mm)	Dimensions carton (cm)
530001	500	28,5 X 14,5 X 8,5	53 x 45,5 x 30,5

MODE D'EMPLOI

- Prenez un sac de la boîte distributrice
- Positionnez le sac sur le seau, puis rabattre l'assis de la chaise.
- Vérifiez que le tampon est bien disposé au fond du sac protège-seau (1).
- Allez à la selle.
- Attendez 1 minute que les fluides corporels soient bien absorbés par le tampon.
- Fermez le sac en tirant sur les liens (2)
- Une fois clos hermétiquement, vous pouvez jeter le sac à la poubelle (3).



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de contact oculaire, rincer abondamment l'œil et contacter un médecin.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
- Ne pas réutiliser après emploi
- Ne pas laisser à la portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

ABENA® **Abena-Frantex SA**
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

