

# Sac INCO BAG « protège bassin »

## HYGIENE

**DESCRIPTION** : Le sac est conçu pour protéger les bassins de lit des souillures (urines, matières fécales). Il associe un sac étanche, muni de liens, à un tampon très absorbant destiné à gélifier les liquides corporels et bloquer les odeurs.

### HYGIENE

- Évite les souillures au niveau du bassin
- Neutralise les mauvaises odeurs et les contient
- Evite le risque de renversement grâce à la gélification du tampon

### CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Chaque sac se retire individuellement de la boîte distributrice
- Simplifie le travail du personnel d'accompagnement ou même de la famille
- Permet un gain de temps considérable par rapport à un lavage du bassin
- Plus besoin de nettoyer le bassin à chaque utilisation

### GESTION DES DECHETS

- Fermeture hermétique et facile grâce à son système de liens
- Evite les risques infectieux et leur propagation
- Peut se jeter dans une poubelle ménagère

Vue de dessus



## DONNEES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Sac et liens coulissants en polyéthylène, tampon en non tissé à base de fluff (cellulose) et de polymères super absorbants (SAP)	<b>Dimensions</b>	Sac étanche : 60 X 39 cm (épaisseur 38 microns) Tampon : 13 X 24 cm
<b>Utilisation</b>	Usage unique	<b>Classe CE</b>	Dispositif médical classe I
<b>Absorption</b>	600 ml de solution saline à 0,9 % de NaCl - 1300 ml d'eau pure	<b>Stockage</b>	Conserver dans un local sec avec une t° entre - 20°C et + 60°C. Durée de conservation = 36 mois
<b>Origine de fabrication</b>	Fabriqué en Chine		



# Sac INCO BAG « protège bassin »


## DONNEES LOGISTIQUES

Références	Dimension sac (cm)	GENCODE	Unités par boîte / par carton
1000018177	20 sacs de 60 X 39	3700901324461	20 / 360

Références	Poids boîte (g)	Dimensions boîte (mm)	Dimensions carton (cm)
1000018177	841	28,5 X 14,5 X 8,5	53 X 45,5 X 30,5

## MODE D'EMPLOI

- Prenez un sac dans sa boîte distributrice et positionnez-le sur le bassin.
- Vérifiez que le tampon est bien disposé au fond du sac protège bassin (1).
- Allez à la selle.
- Attendez 1 minute que les fluides corporels soient bien absorbés par le tampon.
- Fermez le sac en tirant sur les liens (2)
- Une fois clos hermétiquement, vous pouvez jeter le sac à la poubelle (3).

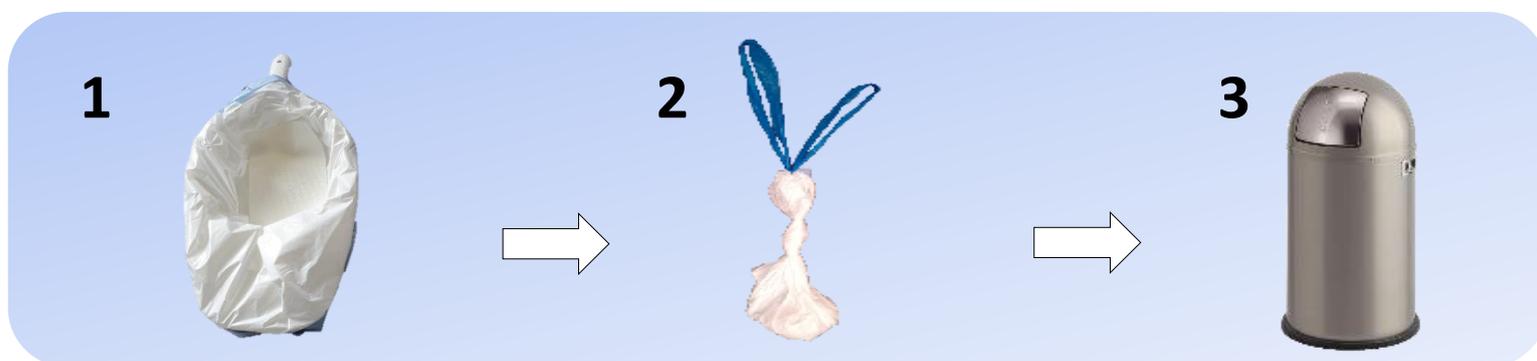

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de contact oculaire, rincer abondamment l'œil et contacter un médecin.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
- Ne pas réutiliser après emploi
- Ne pas laisser à la portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

**ABENA®** **Abena-Frantex SA**  
5 rue Thomas Edison  
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

🌐 www.abena-frantex.fr

